

CHEMDENT

UV FRAME

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU



CHEMDENT DENTAL MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İ.T.O.B., No:36, 2. Cd., 34959 Tepeören OSB/Tuzla/İstanbul

info@chemdent.com.tr | Tel: 0216 464 2424

İÇİNDEKİLER TABLOSU

GİRİŞ.....	1
GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	2
CİHAZ BİLGİLERİ	3
ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ.....	4
BAKIM VE ONARIM	5
KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	5
GARANTİ KAPSAMI VE BELGESİ	5

1.GİRİŞ

**Değerli Müşterimiz,
Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.**

EN 150 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve direktifleri çerçevesinde, en **KALİTELİ** malzemelerle üretilen ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu cihaz UV Bas plak gibi ışığa duyarlı uv reçine bazlı malzemelerin hızlı polimerizasyonu için tasarlanmıştır.

Bu kılavuz, aldığınız ürünü mümkün olan en uzun süre güvenle kullanmanız için hazırlanmıştır.
Lütfen dikkatle okuyunuz ve önerilerimize uyunuz.

Bu kitapçık, cihazınızın kullanımı ile ilgili önemli bilgiler, ipuçları, öneriler ve uyarılar içerir. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce kılavuzda yer alan bilgileri dikkatle okumanız hem sizin güvenliğiniz hem de cihazınızın uzun yıllar sorun çıkarmadan kullanılabilmesi açısından oldukça önemlidir.


2. GÜVENLİK BİLGİLERİ

Firmamız bu talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

- Bakım ve onarım çalışmaları sadece yetkili servis teknisyenleri tarafından yapılır. Onarım ve bakımın yetkili olmayan teknisyenler tarafından yapılması sizin için tehlikeli olabilir.
- Herhangi bir şekilde cihazın özelliklerini değiştirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Üründe teknik değişiklikler yapmayın.
- Ürünü kullanım amacı dışında kullanmayın.
- Lamba cıva içerir, ömrü bitmiş lambalar bertaraf yasalarına uygun olarak imha edilmelidir.
- Temizlik yapılırken cihaz hafif nemli bez ile temizlenmeli cihazın içine ya da kablolarına su temas etmemesi için dikkatli olunmalıdır.

UYARI: Elektrik çarpması riskini yok etmek için **KESİNLİKLE** kaçak akım rölesi ve topraklaması olan tesisatlarda kullanınız.

3. CİHAZ BİLGİLERİ

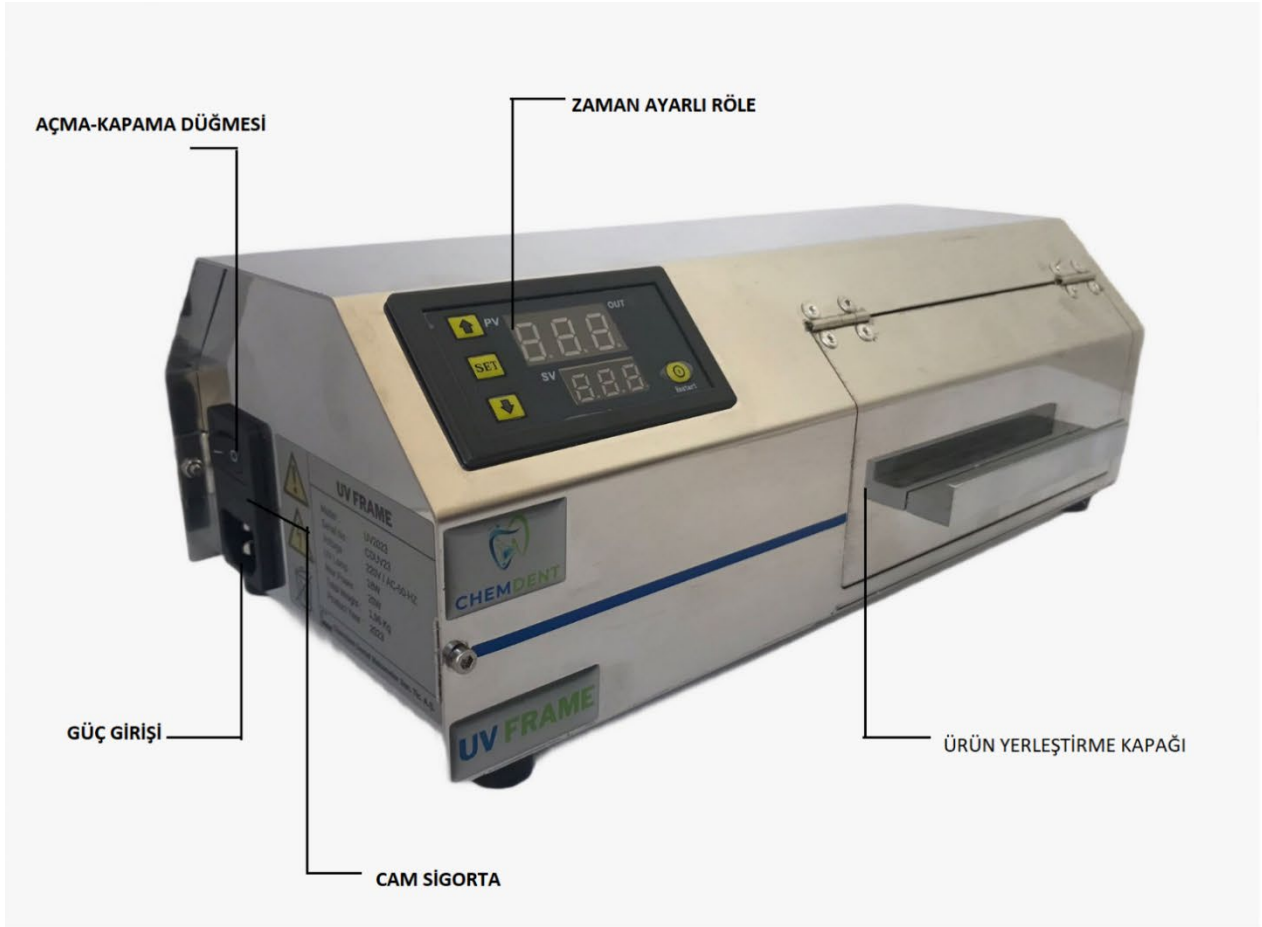

- Besleme Gerilimi ve Frekansı: AC 220V-50/60Hz
- Güç Tüketimi: <20 Watt
- Genel Boyutlar: 170x305x110H mm
- Ağırlık: 1,96 Kg
- Kuruma Süresi: 0,1 dakikadan 9,9 dakikaya kadar
- Uv Lamba-Mavi: 18W/0,34A – 350-400 nm arası UV ışınımı
- Lamba Raf Ömrü: yaklaşık 2.000 saat
- Üretim yılı: 2023

4.ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ

- Cihazla beraber gönderilen kablo AC 220 V gerilimli prize takılır.
- Cihazın kapağı açılarak ürün yerleştirilir ve kapak kapatılır.
- Açma kapama düğmesi açılır.
- Zaman ayarlı elektronik röleyle istenilen zaman ayarlanır.
- Süre bitiminde lambalar kendiliğinden söner.
- Süreyi yeniden başlatmak için restart tuşuna basılır.

UYARI: Cihaz kapağı açıkken cihaz çalıştırılmamalıdır. UV-A ışın gözlere zarar verebilir.

Zaman Ayarlı Röle Modülünün Özellikleri



220v ile çalışan zaman ayarlı röle modülü 1 saniyeden 999 saate kadar zaman ayarı yapabileceğiniz bu ürünün 6 farklı çalışma modu bulunmaktadır.

Set tuşuna bir kez basıldığında zaman ayarı kısmı açılır. Kırmızı ekranda gösterilen süre T1, mavi ekranda gösterilen ise T2 süresidir. Set tuşuna uzun basıldığında ise mod değişim ekranı aktif olur.

Çalışma Modları:

- P0-0: Saniye modu 0-999 saniye arası kullanılabilir.
- P0-1: Dakika modu 0-999 dakika arası kullanılabilir.
- P0-2: Saat modu 0-999 saat arası kullanılabilir.
- P1-0: Belirlenen T1 süresi kadar beklemenin ardından röle devreye girer ve açık kalır. Restart tuşuna basıldığında süre tekrar başlar.
- P1-1: Belirlenen T1 süresi kadar açık kalan röle süre bittiğinde kapanır. Restart tuşuna basıldığında tekrar başlar.
- P1-2: Belirlenen T1 süresi kadar kapalı kalan röle ardından T2 süresi kadar açık kalır. Süre bittiğinde işlem sonlanır. Restart tuşuna basıldığında bu döngü tekrar başlar.

- P1-3: Belirlenen T1 süresi kadar açık kalan röle ardından T2 süresi kadar kapalı kalır. Süre bittiğinde röle açık kalır. Restart tuşuna basana kadar röle açık kalmaya devam eder hiç kapanmaz.
- P1-4: Belirlenen T1 süresi kadar kapalı kalan röle ardından T2 süresi kadar açık kalır. Bu işlem sonsuz bir döngü olarak tekrar eder.
- P1-5: Belirlenen T1 süresi kadar açık kalan röle ardından T2 süresi kadar kapalı kalır. Bu işlem sonsuz bir döngü olarak tekrar eder.

5.BAKIM VE ONARIM

- Teknik bakım ve onarım yetkili kişilerce yapılmalıdır.

6. KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Islak yerlerde cihazı çalıştırmayınız.
- Cihazı kullanmadığınız durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazı topraklı ve emniyet sigortalı prizlerde kullanınız.
- Ömrü biten lambalar çöpe atılmamalı ve kırılmamalıdır. Bertaraf yasalarına uygun imha edilmelidir.
- Cihaz yangın riski olmayan yerlerde bekletilmelidir.

Uyarı! Temizlik öncesi cihazın enerjisini devre dışı bırakınız.
Cihazın temizliğinde sadece nemli bez kullanınız.

7. GARANTİ KAPSAMI VE BELGESİ

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren iki (2) yıldır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti kapsamı dışında olması;

- Cihaz 220 -230 Volt gerilim aralığında çalışacak şekilde tasarlanmış olup, düşük ya da yüksek gelecek voltajdan kaynaklı hasarlar,
- Cihazın yanlış kullanımı,
- Cihazın yetersiz/yanlış bakımı,
- Cihazın dikkatsiz taşınmasından kaynaklanan hasarlar,
- Cihazın bileşenlerinin üreticisinin izni olmadan değiştirilmesi sonucu oluşan hasarlar,
- Bu kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değildir.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI FİRMA	: CHEMDENT DENTAL MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	: İ.T.O.B., No:36, 2. Cd., 34959 Tepeören OSB/Tuzla/İstanbul
TELEFON	: 0216 464 2424
İMZA-KAŞE	:
ÜRÜNÜN CİNSİ	: UV POLİMERİZASYON CİHAZI
MARKASI	: UV FRAME
MODEL KODU	:
BANDROL SERİ NO	:
TESLİM TARİHİ	:
GARANTİ SÜRESİ	: 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ	: 30 GÜN
YETKİLİ SATICI FİRMA	: CHEMDENT DENTAL MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	: İ.T.O.B., No:36, 2. Cd., 34959 Tepeören OSB/Tuzla/İstanbul
TELEFON	: 0216 464 2424
İMZA-KAŞE	:



📍 Tepeören İTOSB Mahallesi 2.Cad. No:36 Tuzla/İstanbul

☎ +90 216 464 24 24

📞 +90 501 039 18 00

✉ info@chemdent.com.tr

🌐 www.chemdent.com.tr